

INSTALACIÓN DE DRIVERS Rehacom

GUÍA
RAPIDA

HASOMED
RehaCom®

 DE LA ROSA
RESEARCH

ELEMENTOS / ACCESORIOS

a.



b.



Cable USB

TENGA EN CUENTA

Esta guía ha sido desarrollada para la instalación de drivers en los sistemas operativos:
Windows 10 y Windows 7.

3.

INSTRUCCIONES

1. Para descargar el software de Rehacon ingrese a :

<http://delarosaresearch.com/uploads/software/RehaCom6.4.2.0-CO-DeLaRosaSAS.iso>

2. Descomprima el archivo, ejecute el archivo con nombre (.setup.exe) y siga las instrucciones.

3. Conecte la consola al computador.

4. Abra el software de Rehacon, verifique que el modo de licencia este debidamente seleccionada y siga la siguiente ruta: (Sistema -> modo con licencia). Seleccione la opción "con un panel de pacientes o dongle".

Nota: Si esto no resuelve el detección de la consola siga los siguientes pasos:

5. Diríjase a los archivos descargados y ejecutelos: [USBPultDriver.exe](#) y [Pult_setup.exe](#).


6. Repita la instrucción 4 y verifique el funcionamiento de la consola.

Nota: Si esto aún no resuelve el detección de la consola siga los siguientes pasos:

4.

1. PASOS WINDOWS 10

1.1 Haga un clic en el Menú de inicio  y escoja **Configuración**.

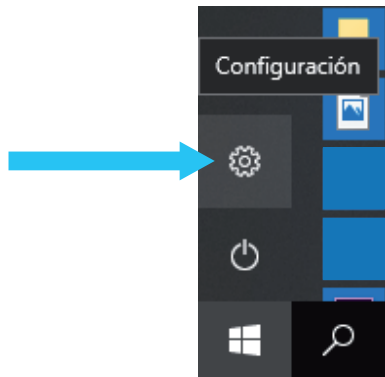


1.2 Haga clic en **Actualización y seguridad**.



5.

PASOS

1.3 Haga clic en **Recuperación**.

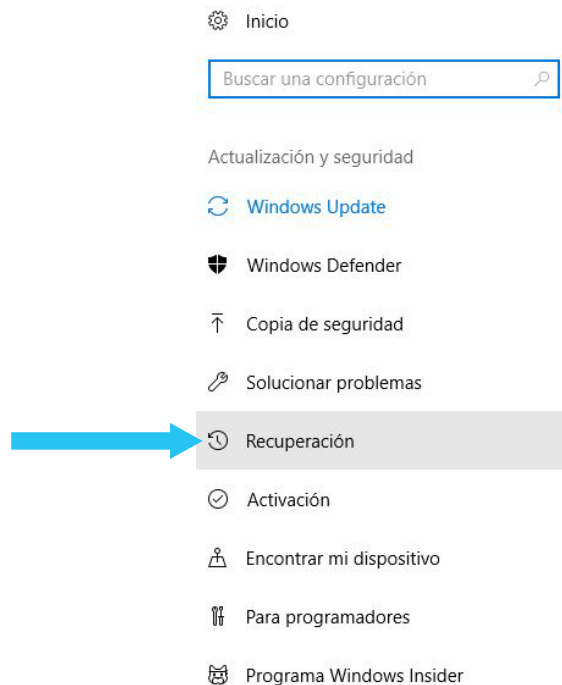

PASOS

1.4 Debajo de la opción de Inicio avanzado haga clic en [Reiniciar ahora](#).

Recuperación

Restablecer este PC

Si el equipo no se ejecuta correctamente, restablecerlo puede ser de ayuda. Con esta opción puedes elegir mantener tus archivos personales o eliminarlos y después reinstalar Windows.

Comenzar

Inicio avanzado

Inicia desde un dispositivo o disco (como una unidad USB o un DVD), cambia la configuración de inicio de Windows o restaura Windows desde una imagen del sistema. Tu PC se reiniciará.


 Reiniciar ahora

Más opciones de recuperación

[Más información sobre cómo empezar de cero con una instalación limpia de Windows](#)

OPCIONES

1.5 Haga clic en [Solucionar problemas](#).

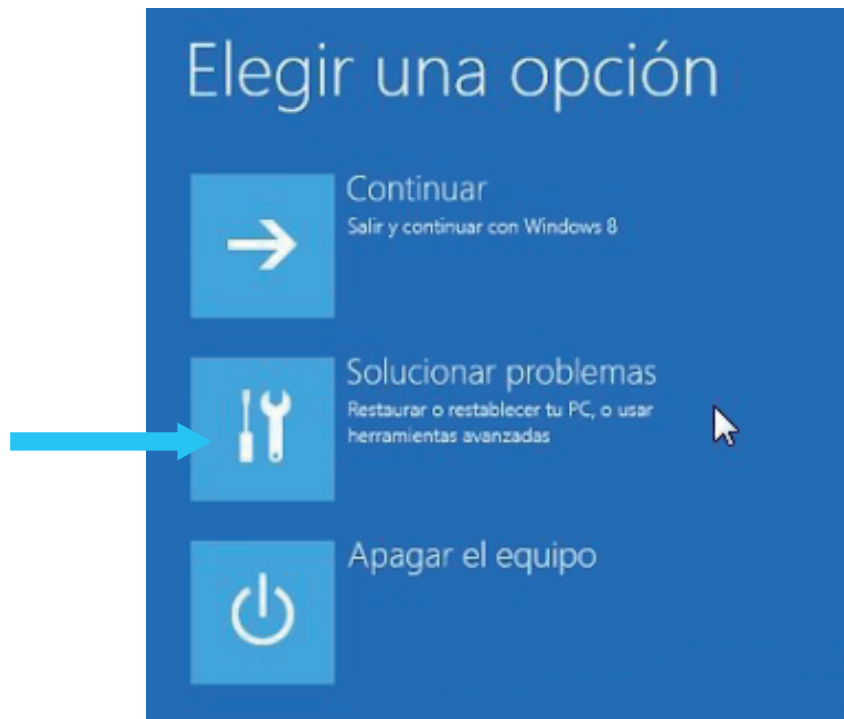


OPCIONES

1.6 Haga clic en Opciones avanzadas.



CONFIGURACIÓN

1.7 Presione **F7** para seleccionar la opción 7.

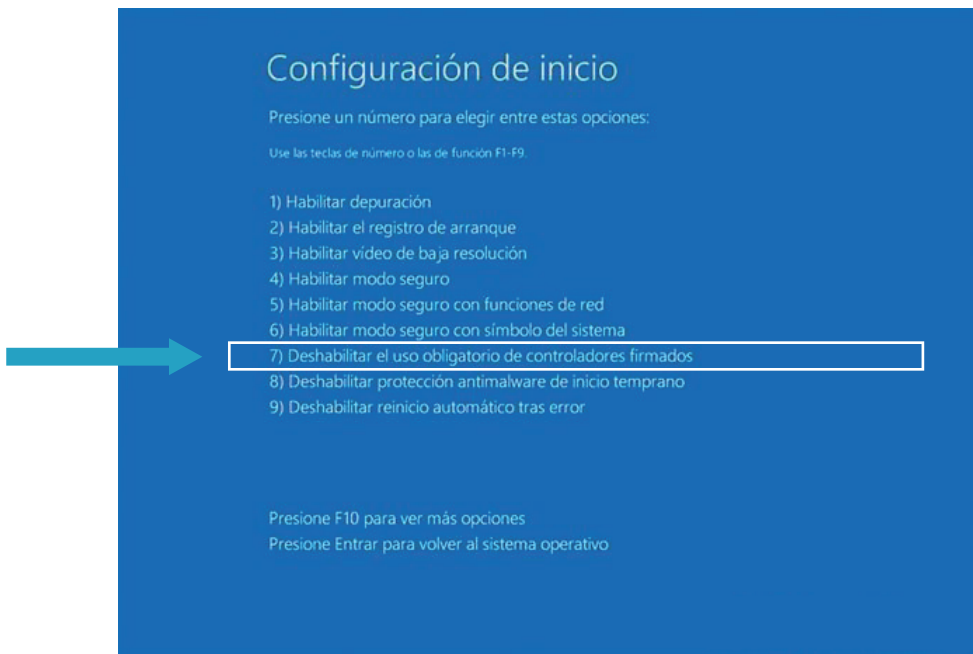

Configuración de inicio

Presione un número para elegir entre estas opciones:
Use las teclas de número o las de función F1-F9.

- 1) Habilitar depuración
- 2) Habilitar el registro de arranque
- 3) Habilitar vídeo de baja resolución
- 4) Habilitar modo seguro
- 5) Habilitar modo seguro con funciones de red
- 6) Habilitar modo seguro con símbolo del sistema
- 7) Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
- 8) Deshabilitar protección antimalware de inicio temprano
- 9) Deshabilitar reinicio automático tras error

Presione F10 para ver más opciones
Presione Entrar para volver al sistema operativo

ARCHIVOS

1.8 INSTRUCCIONES:

1. Diríjase a los archivos descargados y ejecutelos: [USBPultDriver.exe](#) y [Pult_setup.exe](#).
2. Abra el software de Rehacom, verifique que el modo de licencia este debidamente seleccionada y siga la siguiente ruta: ([Sistema](#) -> [modo con licencia](#)). Seleccione la opción “[con un panel de pacientes o dongle](#)”

FINALIZAR


- 1.9 Una vez terminado el proceso compruebe que la consola este funcionando con el software de Rehacom.



2. PASOS WINDOWS 7

2.1 Acceder a (menú de Inicio -> Todos los programas ->Accesorios), dar clic derecho en Símbolo del sistema y ejecutar como administrador. En la ventana que se abre escribir el siguiente comando:

```
bcdedit /set nointegritychecks ON
```

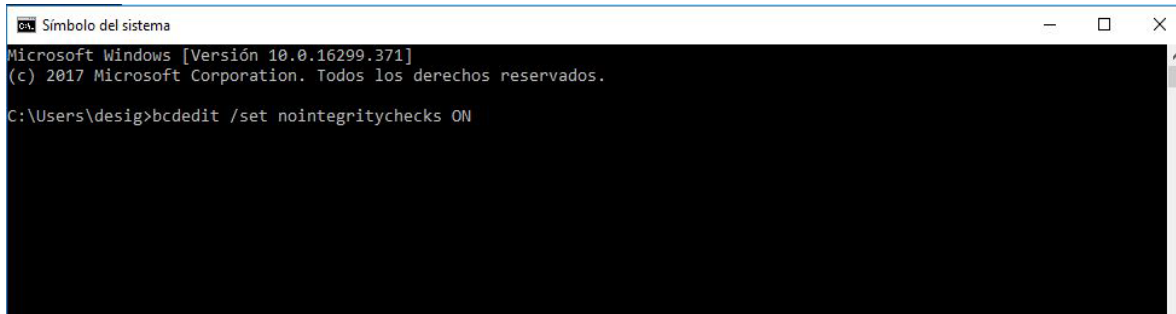

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.16299.371]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\desig>bcdedit /set nointegritychecks ON
```

2.2 Pulsar Enter y seguidamente reiniciar el PC.

ARCHIVOS

2.3 INSTRUCCIONES:

1. Diríjase a los archivos descargados y ejecutelos: [USBPultDriver.exe](#) y [Pult_setup.exe](#).
2. Abra el software de Rehacom, verifique que el modo de licencia este debidamente seleccionada y siga la siguiente ruta: ([Sistema](#) -> [modo con licencia](#)). Seleccione la opción “[con un panel de pacientes o dongle](#)”
3. Verifique el funcionamiento de la consola.

ACTIVACIÓN

2.4 Para volver a activar la comprobación de la firma digital se debe realizar los mismos pasos anteriores. Acceder a ([menú de Inicio](#) -> [Todos los programas](#) -> [Accesorios](#)), y ejecutar como administrador el [Símbolo del sistema](#). Pero ésta vez se usa éste comando:

```
bcdedit /set nointegritychecks OFF
```

2.5 Pulsar Enter y reiniciar el PC. Al reiniciarse volverá a estar activa la comprobación de firmas digitales.

FINALIZAR

2.6 Una vez terminado el proceso compruebe que la consola este funcionando con el software de RehaCom.



support@delarosaresearch.com
(+57 1) 6275686
(+57) 3003642343
Cll 147 A # 48 - 08. Bogotá, Colombia
2550NW 72nd Ave. Suite 115. Miami, Fl. 33122.